

5.3. 各項檢驗項目採檢一覽表

| 急診檢驗組採檢一覽表 | | | | | | | 送檢時間：24 小時 | | | |
|--------------|---------------|--------------------------------|-----------|-----|------|----------------------------|------------|----------------------|---|---------------------------------|
| 生化檢查 | | | | | | | | | | |
| 健保代碼 | 中文名稱 | 英文名稱 | 檢體類別 | 檢體量 | 容器編號 | 檢體容器 | 報告時間 | 可追加時效 | 注意事項 | |
| 09005 | 血液葡萄糖 | Glucose | 血漿 | 3ml | 4 | Li-Heparin 綠頭管 | 1 小時 | 急診生化 不建議檢 體再加驗 | a) 檢體須避免溶血，採血時宜用 21 號針頭，採集後檢體避免劇烈振動。 b) 多數之生化血檢必須禁食，請確實遵守空腹時間（8-10 小時以上）。 c) 生化及微生物檢體於採檢後 1 小時內(含)送達檢驗科。 d) 檢體採血後若無法立即送檢，離心後冷藏 2-8°C。 e) 體液或滲出液之檢體宜酌加抗凝劑。 | |
| 09005 | 腦脊髓液葡萄糖 | Glucose(CSF) | CSF | 1ml | 21 | 無菌試管/尖底管 | 1 小時 | | | |
| 09040 | 腦脊髓液蛋白質 | CSF Total Protein | CSF | 1ml | 21 | 無菌試管 | 1 小時 | | | |
| 09002 | 血中尿素氮 | BUN | 血漿 | 3ml | 4 | Li-Heparin 綠頭管 | 1 小時 | | | |
| 09015 | 肌酐、血 | Creatinine | 血漿 | 3ml | 4 | Li-Heparin 綠頭管 | 1 小時 | | | |
| 09025 | 天門冬胺酸轉胺酶 | AST(GOT) | 血漿 | 3ml | 4 | Li-Heparin 綠頭管 | 1 小時 | | | |
| 09026 | 丙胺酸轉胺酶 | ALT(GPT) | 血漿 | 3ml | 4 | Li-Heparin 綠頭管 | 1 小時 | | | |
| 09011 | 鈣 | Calcium(Ca) | 血漿 | 3ml | 4 | Li-Heparin 綠頭管 | 1 小時 | | | |
| 09021 | 鈉 | Sodium(Na) | 血漿 | 3ml | 4 | Li-Heparin 綠頭管 | 1 小時 | | | |
| 09022 | 鉀 | Potassium(K) | 血漿 | 3ml | 4 | Li-Heparin 綠頭管 | 1 小時 | | | |
| 09023 | 氯 | Chloride(Cl) | 血漿 | 3ml | 4 | Li-Heparin 綠頭管 | 1 小時 | | | |
| 09032 | 肌酸磷化酶 | CPK | 血漿 | 3ml | 4 | Li-Heparin 綠頭管 | 1 小時 | | | |
| 09071 | 肌酸磷酸酶 | CK-MB | 血漿 | 3ml | 4 | Li-Heparin 綠頭管 | 1 小時 | | | |
| 09033 | 乳酸脫氫酶 | LDH | 血漿 | 3ml | 4 | Li-Heparin 綠頭管 | 1 小時 | | | |
| 09017 | 澱粉酶 | Amylase | 血漿 | 3ml | 4 | Li-Heparin 綠頭管 | 1 小時 | | | |
| 09098 | 心肌旋轉蛋白 T | Troponin T high sensitive STAT | 血漿 | 3ml | 4 | Li-Heparin 綠頭管 | 1 小時 | | | |
| 12015 | C-反應蛋白 | CRP | 血漿 | 3ml | 4 | Li-Heparin 綠頭管 | 1 小時 | | | |
| 09064 | 解脂酶 | Lipase | 血漿 | 3ml | 4 | Li-Heparin 綠頭管 | 1 小時 | | | |
| 09037 | 血氨 | Ammonia | 血漿 | 3ml | 4 | Li-Heparin 綠頭管 | 1 小時 | | | 檢體冰水保存，立即送檢 |
| 24007 | 游離鈣離子 | free Ca ⁺⁺ | 全血 | 1ml | | 含 Heparin 針筒加蓋 | 1 小時 | | | |
| 24007 | 游離鈣離子 | free Ca ⁺⁺ | 血清 | 3ml | 2 | SST 黃頭管 | | | | |
| 24007 | 游離鈣離子 | free Ca ⁺⁺ | 全血 | 1ml | 4 | Li-Heparin 綠頭管 | | | | |
| 10807 | 乙醇(急診路倒傷病用) | Alcohol | 血漿/ 血清 | 3ml | 4/2 | Li-Heparin 綠頭管 /SST 黃頭管 | 1 小時 | | | 抽血前改用優碘 (Providine-Iodine)消毒 |
| 10817 | 乙醇(酒後就醫非屬駕駛用) | Alcohol | 血漿/ 血清 | 3ml | 4/2 | Li-Heparin 綠頭管 /SST 黃頭管 | 1 小時 | | | |
| 10818 限中興 | 乙醇(酒後駕駛用) | Alcohol | 血漿/ 血清 | 3ml | 4/2 | Li-Heparin 綠頭管 /SST 黃頭管 | 1 小時 | | | |
| 09012 | 無機磷 | IP | 血漿 | 3ml | 4 | Li-Heparin 綠頭管 | 1 小時 | | | |
| 09013 | 尿酸 | Uric acid | 血漿 | 3ml | 4 | Li-Heparin 綠頭管 | 1 小時 | | | |
| 09029 | 總膽紅素 | Total bilirubin | 血漿 | 3ml | 4 | Li-Heparin 綠頭管 | 1 小時 | | | |
| 09030 | 直接膽紅素 | Direct bilirubin | 血漿 | 3ml | 4 | Li-Heparin 綠頭管 | 1 小時 | | | |
| 09046 | 鎂 | Mg | 血漿 | 3ml | 4 | Li-Heparin 綠頭管 | 1 小時 | | | |
| 09040 | 總蛋白 | Total Protein | 血漿 | 3ml | 4 | Li-Heparin 綠頭管 | 1 小時 | | | |
| 09059 | 乳酸 | Lactate | 血漿 | 3ml | 31 | NaF 灰頭管 | 1 小時 | 檢體冰水保存，立即送檢 | | |

臺北市立聯合醫院檢驗部

採檢手冊

TCH-QP-5.4-2-(5)

| | | | | | | | | | |
|-------|--------------|--------------------|-----------|-----|-----|----------------------------|------|---|-------------|
| 12193 | N 末端前-B 形利納肽 | NT-ProBNP | 血漿 | 3ml | 4 | Li-Heparin 綠頭管 | 1 小時 | | |
| 10509 | 茶鹼 | Theophylline | 血漿 | 3ml | 4 | Li-Heparin 綠頭管 | 1 小時 | | |
| 12192 | 前降鈣素原 | Precalcitonin(PCT) | 血漿 | 3ml | 4 | Li-Heparin 綠頭管 | 1 小時 | | |
| 10511 | 毛地黃 | Digoxin | 血漿 | 3ml | 4 | Li-Heparin 綠頭管 | 1 小時 | | |
| 10502 | 二苯妥因 | Dilantin | 血漿/ 血清 | 3ml | 4/2 | Li-Heparin 綠頭管 /SST 黃頭管 | 1 小時 | | |
| 09041 | 血液氣體分析 | Blood Gas Analysis | 全血 | 1ml | | 含 Heparin 針筒加蓋 | 20 分 | 無 | 檢體冰水保存，立即送檢 |
| 09041 | 血液氣體分析(靜脈) | Vein Blood Gas | 全血 | 1ml | | 含 Heparin 針筒加蓋 | 20 分 | | |
| 10804 | 一氧化碳 | CO-Oximeter panel | 全血 | 1ml | | 含 Heparin 針筒加蓋 | 20 分 | | |

| 血液檢查 | | | | | | | | | |
|-------|-----------------------------|---------------------|------|----------------|------|------------------------|-----------|-------|-----------------------------|
| 健保代碼 | 中文名稱 | 英文名稱 | 檢體類別 | 檢體量 | 容器編號 | 檢體容器 | 報告時間(日曆天) | 可追加時效 | 注意事項 |
| 08014 | 全套血液檢查 (RBC, WBC, Hb 三項) | CBC | 全血 | 1.5-2.0 ml | 1 | EDTA 紫頭管 | 當天 | 4 小時內 | 180°上下翻轉採血 管輕搖混合避免凝 固 |
| 08011 | 全套血液檢查-I (八項) | CBC-I | 全血 | 1.5-2.0 ml | 1 | EDTA 紫頭管 | 當天 | 4 小時內 | |
| 08001 | 紅血球計數 | RBC | 全血 | 1.5-2.0 ml | 1 | EDTA 紫頭管 | 當天 | 4 小時內 | |
| 08002 | 白血球計數 | WBC | 全血 | 1.5-2.0 ml | 1 | EDTA 紫頭管 | 當天 | 4 小時內 | |
| 08003 | 血色素 | Hb | 全血 | 1.5-2.0 ml | 1 | EDTA 紫頭管 | 當天 | 4 小時內 | |
| 08004 | 血球比值 | Ht | 全血 | 1.5-2.0 ml | 1 | EDTA 紫頭管 | 當天 | 4 小時內 | |
| 08127 | 平均紅血球體積 | MCV | 全血 | 1.5-2.0 ml | 1 | EDTA 紫頭管 | 當天 | 4 小時內 | |
| 08083 | 平均紅血球血紅素 | MCH | 全血 | 1.5-2.0 ml | 1 | EDTA 紫頭管 | 當天 | 4 小時內 | |
| 08084 | 平均紅血球血紅素濃 度 | MCHC | 全血 | 1.5-2.0 ml | 1 | EDTA 紫頭管 | 當天 | 4 小時內 | |
| 08006 | 血小板計數 | Platelet | 全血 | 1.5-2.0 ml | 1 | EDTA 紫頭管 | 當天 | 4 小時內 | |
| 08013 | 白血球分類計數 | WBC-DC | 全血 | 1.5-2.0 ml | 1 | EDTA 紫頭管 | 當天 | 4 小時內 | |
| 08008 | 網狀紅血球計數 | Reticulocyte | 全血 | 1.5-2.0 ml | 1 | EDTA 紫頭管 | 當天 | 4 小時內 | |
| 08029 | 血色素-H | Hb-H | 全血 | 1.5-2.0 ml | 1 | EDTA 紫頭管 | 當天 | 4 小時內 | |
| 11001 | 血型測定(A, B, AB, O) | Blood Group | 全血 | 1.5-2.0 ml | 1 | EDTA 紫頭管 | 當天 | 4 小時內 | |
| 11003 | RH(D)型檢查 | RH(D) | 全血 | 1.5-2.0 ml | 1 | EDTA 紫頭管 | 當天 | 4 小時內 | |
| 08010 | 嗜酸性白血球計數 | Eosino Count | 全血 | 1.5-2.0 ml | 1 | EDTA 紫頭管 | 當天 | 4 小時內 | 180°上下翻轉採血 管輕搖混合避免凝 固 |
| 08005 | 紅血球沉降速度測定 | ESR | 全血 | 1.6 ml | 6 | ESR 管 | 當天 | 4 小時內 | |
| 08009 | 紅血球形態 | RBC Morphology | 全血 | 1.5-2.0 ml | 1 | EDTA 紫頭管 | 當天 | 4 小時內 | |
| 08026 | 凝血酶原時間 | PT | 血漿 | 至刻度 (2.7ml) | 5 | Sodium citrate 藍 頭管 | 當天 | 無 | 180°上下翻轉採血 管輕搖混合避免凝 固 |
| 08036 | 部分凝血活酶時間 | APTT | 血漿 | 至刻度 (2.7ml) | 5 | Sodium citrate 藍 頭管 | 當天 | 無 | |
| 08079 | D-Dimer | D-Dimer | 血漿 | 至刻度 (2.7ml) | 5 | Sodium citrate 藍 頭管 | 當天 | 無 | |
| 08018 | 出血時間(DUKE 氏方 法) | Bleeding Time | 耳朵血 | NA | 無 | 耳垂穿刺 | 當天 | 無 | |
| 08020 | 凝固時間 | Coagulation time | 刺耳血 | NA | 無 | 耳垂穿刺 | 當天 | 無 | |
| 08007 | 瘧原虫 | Malaria | 全血 | 2.0 ml | 1 | EDTA 紫頭管 | 當天 | 4 小時內 | 180°上下翻轉採血 管輕搖混合避免凝 固 |
| 08007 | 血絲蟲 | Filaria | 全血 | 2.0 ml | 1 | EDTA 紫頭管 | 當天 | 4 小時內 | |

| 聯檢中心血液凝固檢查 | | | | | | | | | |
|------------|----------|------------|------|------------|------|--------------------|-----------|-------|--|
| 健保代碼 | 中文名稱 | 英文名稱 | 檢體類別 | 檢體量 | 容器編號 | 檢體容器 | 報告時間(日曆天) | 可追加時效 | 注意事項 |
| 08038 | 纖維蛋白降解產物 | FDP | 血漿 | 至刻度(2.7ml) | 5 | Sodium citrate 藍頭管 | 7 天 | 無 | 180°上下翻轉採血管輕搖混合避免凝固，採檢後需於1個小時內將血漿分離製備為 platelet poor plasma(PPP, 1500g 15min)，請分裝在康氏管加蓋密封冷凍保存。 |
| 08023 | 纖維蛋白原 | Fibrinogen | 血漿 | 至刻度(2.7ml) | 5 | Sodium citrate 藍頭管 | 7 天 | 無 | |
| 08122 | 蛋白 S | Protein S | 血漿 | 至刻度(2.7ml) | 5 | Sodium citrate 藍頭管 | 8 天 | 無 | |
| 08077 | 蛋白 C | Protein C | 血漿 | 至刻度(2.7ml) | 5 | Sodium citrate 藍頭管 | 8 天 | 無 | |

| 尿液體液糞便檢查 | | | | | | | | | |
|----------|------------|-------------------------|------|-----------|------|----------|---------------|-----------|------|
| 健保代碼 | 中文名稱 | 英文名稱 | 檢體類別 | 檢體量 | 容器編號 | 檢體容器 | 報告時間 (日曆天) | 可追加 時效 | 注意事項 |
| 06012 | 尿液常規 | Urine routine | 尿 | 10ml | 9 | 尿液管 | 當天 | 無 | |
| 06013 | 尿生化檢查: | Urine biochemistry: | 尿 | 10ml | 9 | 尿液管 | 當天 | 無 | |
| 06006 | 膽紅素 | Bilirubin | 尿 | 10ml | 9 | 尿液管 | 當天 | 無 | |
| 06007 | 苯酮體 | Ketones | 尿 | 10ml | 9 | 尿液管 | 當天 | 無 | |
| 06002 | 比重 | Sp. Gr | 尿 | 10ml | 9 | 尿液管 | 當天 | 無 | |
| 06008 | 潛血 | Occult Blood | 尿 | 10ml | 9 | 尿液管 | 當天 | 無 | |
| 06001 | 酸鹼值 | PH | 尿 | 10ml | 9 | 尿液管 | 當天 | 無 | |
| 06003 | 蛋白質 | Protein | 尿 | 10ml | 9 | 尿液管 | 當天 | 無 | |
| 06004 | 葡萄糖 | Glucose | 尿 | 10ml | 9 | 尿液管 | 當天 | 無 | |
| 06005 | 尿膽素原 | Urobilinogen | 尿 | 10ml | 9 | 尿液管 | 當天 | 無 | |
| | 亞硝酸鹽 | Nitrite | 尿 | 10ml | 9 | 尿液管 | 當天 | 無 | |
| | 白血球酯 | Leukocyte esterase | 尿 | 10ml | 9 | 尿液管 | 當天 | 無 | |
| 06009 | 尿沈渣: | Urine Sediment: | 尿 | 10ml | 9 | 尿液管 | 當天 | 無 | |
| | 紅血球 | RBC | 尿 | 10ml | 9 | 尿液管 | 當天 | 無 | |
| | 白血球 | WBC | 尿 | 10ml | 9 | 尿液管 | 當天 | 無 | |
| | 上皮細胞 | Epithelial cell | 尿 | 10ml | 9 | 尿液管 | 當天 | 無 | |
| | 圓柱體 | Cast | 尿 | 10ml | 9 | 尿液管 | 當天 | 無 | |
| | 結晶 | Crystal | 尿 | 10ml | 9 | 尿液管 | 當天 | 無 | |
| | 細菌 | Bacteria | 尿 | 10ml | 9 | 尿液管 | 當天 | 無 | |
| 06505 | 懷孕試驗 | hCG 懷孕試驗 | 尿 | 5-10 ml | 9 | 尿液管 | 當天 | 無 | |
| 06010 | 本周氏蛋白試驗 | Bence Jones Protein | 尿 | 10 ml | 9 | 尿液管 | 當天 | 無 | |
| 16006 | 腦脊液常規 | C. S. F. Routine | 腦脊液 | 1ml 以上 | 21 | 無菌試管/尖底管 | 當天 | 4 小時內 | 新鮮送檢 |
| 16008 | 關節囊液分析 | Synovial fluid Analysis | 關節囊液 | 2ml 以上 | 21 | 無菌試管/尖底管 | 當天 | 4 小時內 | 新鮮送檢 |
| 16001 | 精液分析 | Semen Analysis | 精液 | 1 次量 | 27 | 無菌盒 | 當天 | 無 | 新鮮送檢 |
| 16003 | 胸水分析 | Pleural Fluid Analysis | 胸水 | 2ml 以上 | 21 | 無菌試管/尖底管 | 當天 | 4 小時內 | 新鮮送檢 |
| 16002 | 腹水分析 | Ascitic Fluid Analysis | 腹水 | 2ml 以上 | 21 | 無菌試管/尖底管 | 當天 | 4 小時內 | 新鮮送檢 |
| 13001 | 痰液常規 | Sputum routine | 痰液 | 2ml 以上 | 27 | 無菌盒 | 當天 | 無 | 新鮮送檢 |
| 07009 | 糞便常規 | Stool routine | 糞便 | 花生米大 | 23 | 糞便檢體盒 | 當天 | 無 | 新鮮送檢 |
| 07016 | 蛻蟲膠片 | Perianal swab | 糞便 | 適量 | | 蛻蟲膠片 | 當天 | 無 | 新鮮送檢 |
| 07006 | 中性脂肪染色 | Neutral Fat Stain | 糞便 | 花生米大 | 23 | 糞便檢體盒 | 當天 | 無 | 新鮮送檢 |
| 07015 | 脂肪酸染色 | Fatty Acid Stain | 糞便 | 花生米大 | 23 | 糞便檢體盒 | 當天 | 無 | 新鮮送檢 |
| 07003 | 還原物質測定 | Reducing Substances | 糞便 | 花生米大 | 23 | 糞便檢體盒 | 當天 | 無 | 新鮮送檢 |
| 07011 | 阿米巴檢查(直接法) | Amoeba(Direct Smear) | 糞便 | 大拇指第一指節大小 | 23 | 糞便檢體盒 | 當天 | 無 | 新鮮送檢 |
| 07012 | 寄生蟲濃縮集卵法 | Parasite ova | 糞便 | 大拇指第 | 22 | 糞便瓶(集卵) | 2 天 | 無 | 新鮮送檢 |

臺北市立聯合醫院檢驗部

採檢手冊

TCH-QP-5.4-2-(5)

| | | | | | | | | | |
|------------------------|--------------------------|----------------------|--------|--------|----|----------|----|---|------|
| | | concentration | | 一指節大小 | | 瓶) | | | |
| 07001 | 糞便潛血反應 | Stool OB | 糞便 | 花生米大 | 23 | 糞便檢體盒 | 當天 | 無 | 新鮮送檢 |
| 07018 | 糞便膿細胞 | Stool Pus Cell | 糞便 | 花生米大 | 23 | 糞便檢體盒 | 當天 | 無 | 新鮮送檢 |
| 09134 | 糞便潛血分析 (免疫定性法) | Stool O.B. (EIA) | 糞便 | 依說明書採檢 | 24 | 糞便盒(圓綠頭) | 當天 | 無 | 新鮮送檢 |
| 09134 | 糞便潛血分析/老人健檢專用 (免疫定量法) | Stool O.B. (EIA) | 糞便 | 依說明書採檢 | 25 | 糞便盒(扁綠頭) | 7天 | 無 | |
| 院內醫令碼 85 | 糞便潛血分析/國建局腸篩專用(免疫定量法) | Stool O.B. (EIA) | 糞便 | 依說明書採檢 | 25 | 糞便盒(扁綠頭) | 7天 | 無 | |
| ST033 (09134+12047) | 糞便潛血與運鐵蛋白二合一 | Stool OB+Transferrin | 糞便 | 依說明書採檢 | 32 | 定量採便器 | 當天 | 無 | 新鮮送檢 |
| 07001 | 鼻胃管潛血檢查 | N.G. OB | 鼻胃管分泌物 | 適量 | 27 | 無菌盒(無菌杯) | 當天 | 無 | 新鮮送檢 |
| 07001 | 嘔吐物潛血檢查 | Vomiting OB | 嘔吐物 | 適量 | 27 | 無菌盒(無菌杯) | 當天 | 無 | 新鮮送檢 |

快速篩檢檢查

| 健保代碼 | 中文名稱 | 英文名稱 | 檢體類別 | 檢體量 | 容器編號 | 檢體容器 | 報告時間 (日曆天) | 可追加 時效 | 注意事項 |
|-------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-------|-----------|------|----------------|---------------|-----------|--------------|
| 09137 | 血清酮體定量試驗 | Blood ketone body | 血漿 | 2 ml | 4 | Li-Heparin 綠頭管 | 1小時 | 1小時 | |
| 12020 | 肺炎黴漿菌 IgM 抗體 | IgM Mycoplasma pneumonia Ab st | 血漿 | 2 ml | 4 | Li-Heparin 綠頭管 | 當天 | 1小時 | 不可與 IgG 一起開立 |
| E5001C(衛) E5001F(自費) | 登革熱 NSI 抗原快速篩檢試劑 | 登革熱 NSI 抗原快速篩檢試劑 | 全血 | 2 ml | 1 | EDTA 紫頭管 | 1小時 | 1小時 | |
| 14065 | Influen A+B 抗原篩檢 | Influen A+B 抗原篩檢(快速法) | 鼻咽分泌物 | 適量 | 13 | 無菌採檢棒 | 1小時 | 無 | |
| 14058 | 呼吸融合細胞病毒試驗 | RSV screening test | 鼻咽分泌物 | 適量 | 32 | RSV 採檢棒 | 1小時 | 無 | |
| 14064 | 腺病毒抗原檢查 | Adenovirus Ag test | 鼻咽分泌物 | 適量 | 13 | 無菌採檢棒 | 1小時 | 無 | |
| 12165 | GAS(Rapid);Gr. A Streptococcus | GAS(Rapid);Gr. A Streptococcus | 鼻咽分泌物 | 適量 | 13 | 無菌採檢棒 | 1小時 | 無 | |
| 14026 | 輪狀病毒抗原 | Rota_virus_Ag | 糞便 | 適量 | 23 | 糞便檢體盒 | 當天 | 無 | |
| 13029 | 困難梭狀桿菌毒素 A、B 快速檢驗 | Toxin A/B Clostridium Difficile | 糞便 | 大拇指第一指節大小 | 23 | 糞便檢體盒 | 當天 | 無 | |
| 12024 | 尿液肺炎球菌抗原檢測 | 尿液肺炎球菌抗原檢測 | 尿液 | 2 ml | 9 | 尿液管(含蓋) | 當天 | 1小時 | |
| 10810 | 安非他命濃度篩檢 | Amphetamines(EIA/LIA) | 尿液 | 2 ml | 9/30 | 尿液管(含蓋) | 當天 | 無 | |
| 10811 | 嗎啡濃度篩檢 | Morphine (EIA/LIA) | 尿液 | 2 ml | 9/30 | 尿液管(含蓋) | 當天 | 無 | |
| 10813 | 大麻濃度篩檢 | Cannabinoids(EIA/LIA) | 尿液 | 2 ml | 9/30 | 尿液管(含蓋) | 當天 | 無 | |

生化檢驗組採檢一覽表

| 仁愛院區聯合檢驗中心生化組 分機 710-5115 | | | | | | | | | |
|---|----------|-------------------|-------|---------|------|-----------------|---------------|-------------|--|
| 送檢時間：週一至週五上午 8：00～下午 4：30 週六上午 8：00～11：30 | | | | | | | | | |
| 健保代碼 | 中文名稱 | 英文名稱 | 檢體類別 | 檢體量 | 容器編號 | 檢體容器 | 報告時間 (日曆天) | 可追加時 效/天 | 注意事項 |
| 09005 | 葡萄糖 | Glucose | 血清/血漿 | 3ml/2ml | 2/31 | SST 黃頭管/NaF 灰頭管 | 1 天 | 3 天 | AC：建議空腹 8 小時 PC：採檢時間為吃第一口飯開始計時準二小時±5 分鐘，建議吃飯時間於 15 分鐘內完成 |
| 09040 | 總蛋白 | Total protein | 血清 | 3ml | 2 | SST 黃頭管 | 1 天 | 5 天 | a) 檢體須避免溶血，採血時宜用 21 號針頭，採集後檢體避免劇烈振動。 b) 多數之生化血檢必須禁食，請確實遵守空腹時間（8-10 小時以上）。 c) 生化及微生物檢體於採檢後 1 小時內（含）送達檢驗科。 d) 檢體採血後若無法立即送檢，離心後冷藏 2-8℃。 e) 體液或滲出液之檢體宜酌加抗凝劑。 f) 24 小時尿液的生化檢查，採蓄尿後之樣品送檢並註明 24 小時尿總量。 |
| | | | 尿液 | 3ml | 8 | 白頭試管 | 1 天 | 5 天 | |
| 09038 | 白蛋白 | Albumin | 血清 | 3ml | 2 | SST 黃頭管 | 1 天 | 5 天 | |
| 09002 | 尿素氮 | Urea nitrogen | 血清 | 3ml | 2 | SST 黃頭管 | 1 天 | 5 天 | |
| 09003 | 尿素氮 | Urea nitrogen | 尿液 | 3ml | 8 | 白頭試管 | 1 天 | 5 天 | |
| 09015 | 肌酸酐 | Creatinine | 血清 | 3ml | 2 | SST 黃頭真空管 | 1 天 | 5 天 | |
| 09016 | 肌酸酐 | Creatinine | 尿液 | 3ml | 8 | 白頭試管 | 1 天 | 5 天 | |
| 09013 | 尿酸 | Uric acid | 血清 | 3ml | 2 | SST 黃頭管 | 1 天 | 5 天 | |
| 09001 | 總膽固醇 | Total cholesterol | 血清 | 3ml | 2 | SST 黃頭管 | 1 天 | 5 天 | |
| 09004 | 三酸甘油酯 | Triglyceride | 血清 | 3ml | 2 | SST 黃頭管 | 1 天 | 5 天 | |
| 09029 | 總膽紅素 | Total bilirubin | 血清 | 3ml | 2 | SST 黃頭管 | 1 天 | 1 天 | |
| 09030 | 直接膽紅素 | Direct bilirubin | 血清 | 3ml | 2 | SST 黃頭管 | 1 天 | 1 天 | |
| 09025 | 天門冬胺酸轉胺酶 | AST(GOT) | 血清 | 3ml | 2 | SST 黃頭管 | 1 天 | 5 天 | |
| 09026 | 丙胺酸轉胺酶 | ALT(GPT) | 血清 | 3ml | 2 | SST 黃頭管 | 1 天 | 5 天 | |
| 09027 | 鹼性磷酸酯酶 | ALP | 血清 | 3ml | 2 | SST 黃頭管 | 1 天 | 5 天 | |
| 09031 | r-麩胺醯轉移酶 | r-GT | 血清 | 3ml | 2 | SST 黃頭管 | 1 天 | 5 天 | |
| 09043 | 高密度脂蛋白 | HDL-C | 血清 | 3ml | 2 | SST 黃頭管 | 1 天 | 5 天 | |
| 09044 | 低密度脂蛋白 | LDL-C | 血清 | 3ml | 2 | SST 黃頭管 | 1 天 | 5 天 | |
| 09021 | 鈉離子 | Na | 血清 | 3ml | 2 | SST 黃頭管 | 1 天 | 3 天 | |
| | | | 尿液 | | 8 | 白頭試管 | 1 天 | 3 天 | |
| 09022 | 鉀離子 | K | 血清 | 3ml | 2 | SST 黃頭管 | 1 天 | 3 天 | |
| | | | 尿液 | 3ml | 8 | 白頭試管 | 1 天 | 3 天 | |
| 09023 | 氯離子 | CL | 血清 | 3ml | 2 | SST 黃頭管 | 1 天 | 3 天 | |
| | | | 尿液 | 3ml | 8 | 白頭試管 | 1 天 | 3 天 | |
| 09011 | 鈣離子 | Ca | 血清 | 3ml | 2 | SST 黃頭管 | 1 天 | 3 天 | |
| | | | 尿液 | 3ml | 8 | 白頭試管 | 1 天 | 3 天 | |

| | | | | | | | | |
|-------|--------|---------------------|------|-----|---|----------|-----|-----|
| 09012 | 無機磷 | P | 血清 | 3ml | 2 | SST 黃頭管 | 1 天 | 3 天 |
| 09033 | 乳酸脫氫酶 | LDH | 血清 | 3ml | 2 | SST 黃頭管 | 1 天 | 5 天 |
| 09034 | 乳酸脫氫酶 | LDH | 其他體液 | 3ml | 8 | 白頭試管 | 1 天 | 5 天 |
| 09032 | 肌酸激酶 | CPK | 血清 | 3ml | 2 | SST 黃頭管 | 1 天 | 5 天 |
| 09017 | 澱粉酶 | Amylase | 血清 | 3ml | 2 | SST 黃頭管 | 1 天 | 5 天 |
| 09020 | 鐵 | Iron | 血清 | 3ml | 2 | SST 黃頭管 | 1 天 | 5 天 |
| 09035 | 總鐵結合力 | TIBC | 血清 | 3ml | 2 | SST 黃頭管 | 1 天 | 5 天 |
| 12015 | C-反應蛋白 | CRP | 血清 | 3ml | 2 | SST 黃頭管 | 1 天 | 5 天 |
| 09006 | 糖化血紅素 | HbA1c | 全血 | 2ml | 1 | EDTA 紫頭管 | 2 天 | 7 天 |
| 10510 | 發爾波克 | Valproic Acid | 血清 | 3ml | 2 | SST 黃頭管 | 1 天 | 5 天 |
| 12111 | 尿液微白蛋白 | Microalbumin(Urine) | 尿液 | 3ml | 8 | 白頭試管 | 2 天 | 5 天 |

血清檢驗組採檢一覽表

仁愛院區聯合檢驗中心血清組 分機 710-5135

送檢時間：週一至週五上午 8：00～下午 4：30 週六上午 8：00～11：30

| 健保代碼 | 檢驗項目 | 英文名稱 | 檢體類別 | 檢體量 | 容器編號 | 檢體容器 | 報告時間 (日曆天) | 可追加時 效/天 | 注意事項 |
|-------|----------------|----------------------------------|------|-------|------|----------|---------------|-------------|--------------------|
| 12007 | 阿爾發胎兒蛋白 | AFP | 血清 | 3ml | 2 | SST 黃頭管 | 2 天 | 5 天 | |
| 12021 | 癌胚胎抗原 | CEA | 血清 | 3ml | 2 | SST 黃頭管 | 2 天 | 5 天 | |
| 12022 | 絨毛膜促性腺激素 | β -HCG | 血清 | 3ml | 2 | SST 黃頭管 | 2 天 | 3 天 | |
| 12077 | 癌抗原 125 | CA 125 | 血清 | 3ml | 2 | SST 黃頭管 | 2 天 | 5 天 | |
| 12078 | 癌抗原 153 | CA-153 | 血清 | 3ml | 2 | SST 黃頭管 | 2 天 | 5 天 | |
| 12079 | 癌抗原 199 | CA 199 | 血清 | 3ml | 2 | SST 黃頭管 | 2 天 | 5 天 | |
| 12081 | 攝護腺特異抗原 | Total PSA | 血清 | 3ml | 2 | SST 黃頭管 | 2 天 | 5 天 | |
| 12198 | 游離型攝護腺特異抗原 | Free PSA | 血清 | 3ml | 2 | SST 黃頭管 | 2 天 | 5 天 | |
| 12116 | 鐵蛋白 | Ferritin | 血清 | 3ml | 2 | SST 黃頭管 | 2 天 | 5 天 | |
| 14032 | B 型肝炎表面抗原(定性) | HBsAg | 血清 | 3ml | 2 | SST 黃頭管 | 2 天 | 5 天 | |
| 14096 | B 型肝炎表面抗原(定量) | HBsAg quantitative determination | 血清 | 3ml | 2 | SST 黃頭管 | 7 天 | 7 天 | |
| 14051 | C 型肝炎抗體 | Anti-HCV | 血清 | 3ml | 2 | SST 黃頭管 | 2 天 | 5 天 | |
| 14033 | B 型肝炎表面抗體 | Anti-HBs | 血清 | 3ml | 2 | SST 黃頭管 | 2 天 | 5 天 | |
| 14035 | B 型肝炎 e 抗原 | HBeAg | 血清 | 3ml | 2 | SST 黃頭管 | 2 天 | 5 天 | |
| 14036 | B 型肝炎 e 抗體 | Anti-HBe | 血清 | 3ml | 2 | SST 黃頭管 | 2 天 | 5 天 | |
| 14037 | B 型肝炎核心抗體 | Anti-HBc | 血清 | 3ml | 2 | SST 黃頭管 | 2 天 | 5 天 | |
| 14038 | B 型肝炎核心 IgM 抗體 | Anti-HBc IgM | 血清 | 3ml | 2 | SST 黃頭管 | 2 天 | 5 天 | |
| 14039 | A 型肝炎 IgM 抗體 | Anti-HAV IgM | 血清 | 3ml | 2 | SST 黃頭管 | 2 天 | 5 天 | |
| 14040 | A 型肝炎抗體 | Anti-HAV | 血清 | 3ml | 2 | SST 黃頭管 | 2 天 | 5 天 | |
| 14044 | 德國麻疹抗體 | Rubella IgG | 血清 | 3ml | 2 | SST 黃頭管 | 2 天 | 5 天 | |
| 14070 | 麻疹病毒抗體 IgG | Measles Ab (IgG) | 血清 | 3ml | 2 | SST 黃頭管 | 4 天 | 14 天 | |
| 09117 | 三碘甲狀腺素 | T3 | 血清 | 3ml | 2 | SST 黃頭管 | 2 天 | 5 天 | |
| 09010 | 四碘甲狀腺素 | T4 | 血清 | 3ml | 2 | SST 黃頭管 | 2 天 | 5 天 | |
| 09106 | 游離性四碘甲狀腺 | Free T4 | 血清 | 3ml | 2 | SST 黃頭管 | 2 天 | 5 天 | |
| 09112 | 甲狀腺刺激素 | TSH | 血清 | 3ml | 2 | SST 黃頭管 | 2 天 | 5 天 | |
| 09103 | 胰島素(飯後) | Insulin(PC) | 血清 | 3ml | 2 | SST 黃頭管 | 2 天 | 1 天 | |
| 09103 | 胰島素(飯前) | Insulin(AC) | 血清 | 3ml | 2 | SST 黃頭管 | 2 天 | 1 天 | |
| 09105 | 黃體酯酮 | Progesterone | 血清 | 3ml | 2 | SST 黃頭管 | 2 天 | 5 天 | |
| 09119 | 促腎上腺皮質素 | ACTH | 血漿 | 1.5ml | 1 | EDTA 紫頭管 | 2 天 | 無 | 需置放冰水立即送檢，離心分離血漿冷凍 |
| 09113 | 皮質素 | Cortisol | 血清 | 3ml | 2 | SST 黃頭管 | 2 天 | 5 天 | |
| 09120 | 泌乳激素 | Prolactin | 血清 | 3ml | 2 | SST 黃頭管 | 2 天 | 5 天 | |

臺北市立聯合醫院檢驗部

採檢手冊

TCH-QP-5.4-2-(5)

| | | | | | | | | | |
|--------|-----------------------------|--------------------------------|----|----------------|------|---------|----|-----|----------------------------------|
| 09121 | 睪固酮 | Testosterone | 血清 | 3ml | 2 | SST黃頭管 | 2天 | 5天 | |
| 09122 | 完整副甲狀腺素 | Intact-PTH | 血清 | 3ml | 2 | SST黃頭管 | 2天 | 無 | |
| 09125 | 濾泡激素 | FSH | 血清 | 3ml | 2 | SST黃頭管 | 2天 | 5天 | |
| 09126 | 黃體化激素 | LH | 血清 | 3ml | 2 | SST黃頭管 | 2天 | 5天 | |
| 09127 | 二氫基春情素 | Estradiol | 血清 | 3ml | 2 | SST黃頭管 | 2天 | 2天 | |
| 09128 | C-胜肽胰島素(飯前) | C-Peptide(AC) | 血清 | 3ml | 2 | SST黃頭管 | 2天 | 1天 | |
| 09128A | C-胜肽胰島素(飯後) | C-Peptide(PC) | 血清 | 3ml | 2 | SST黃頭管 | 2天 | 1天 | |
| 12068 | 抗甲狀腺抗體 | Anti-Tg Ab | 血清 | 3ml | 2 | SST黃頭管 | 2天 | 3天 | |
| 12134 | 抗甲狀腺過氧化酶抗體 | Anti-TPO Ab | 血清 | 3ml | 2 | SST黃頭管 | 2天 | 3天 | |
| 12004 | 抗鏈球菌素 | ASLO | 血清 | 3ml | 2 | SST黃頭管 | 2天 | 8天 | |
| 12011 | 類風濕因子 | RA | 血清 | 3ml | 2 | SST黃頭管 | 2天 | 8天 | |
| 12025 | 免疫球蛋白 IgG | IgG | 血清 | 3ml | 2 | SST黃頭管 | 2天 | 8天 | |
| 12027 | 免疫球蛋白 IgA | IgA | 血清 | 3ml | 2 | SST黃頭管 | 2天 | 8天 | |
| 12029 | 免疫球蛋白 IgM | IgM | 血清 | 3ml | 2 | SST黃頭管 | 2天 | 8天 | |
| 12031 | 免疫球蛋白 IgE | IgE | 血清 | 3ml | 2 | SST黃頭管 | 2天 | 8天 | |
| 12034 | 補體 C3 | C3 | 血清 | 3ml | 2 | SST黃頭管 | 2天 | 8天 | |
| 12038 | 補體 C4 | C4 | 血清 | 3ml | 2 | SST黃頭管 | 2天 | 8天 | |
| 12048 | 轉鐵蛋白 | Transferrin | 血清 | 3ml | 2 | SST黃頭管 | 2天 | 8天 | |
| 12110 | 前白蛋白 | Prealbumin | 血清 | 3ml | 2 | SST黃頭管 | 2天 | 8天 | |
| 09316 | 缺糖型式運鐵蛋白 | CDT | 血清 | 3ml | 2 | SST黃頭管 | 5天 | 8天 | |
| 12020 | 黴菌肺炎抗體 | Myc. Pneumonia Ab | 血清 | 3ml | 2 | SST黃頭管 | 2天 | 無 | |
| 14026 | 輪狀病毒抗原 | Rota virus Ag(Stool) | 糞便 | 花生米大 或 3 ml | 23/9 | 尖底管/糞便盒 | 2天 | 無 | |
| 12008 | 寒冷凝集反應 | Cold hemoagglutinin | 血清 | 3ml | 2 | SST黃頭管 | 3天 | 無 | 採檢後立即送檢勿冷藏 |
| 12012 | 冷凝球蛋白 | Cryoglobulin | 血清 | 3ml | 2 | SST黃頭管 | 7天 | 7天 | 抽血後立即放置 37℃ 水浴送檢，使血液在 37℃ 狀態下凝固。 |
| 30022 | 過敏原 | MAST | 血清 | 3ml | 2 | SST黃頭管 | 5天 | 7天 | |
| 12149 | 免疫球蛋白 IgG4 | IgG4 | 血清 | 3ml | 2 | SST黃頭管 | 7天 | 8天 | |
| 09129 | 維生素 B12 | B12 | 血清 | 3ml | 2 | SST黃頭管 | 2天 | 2天 | |
| 09130 | 葉酸 | Folate | 血清 | 3ml | 2 | SST黃頭管 | 2天 | 2天 | |
| 13054 | 梭羅桿菌毒素檢測 | Clostridium difficile toxinA+B | 大便 | 花生米大 或 3 ml | 9/23 | 尖底管/糞便盒 | 2天 | 無 | |
| 12060 | 抗雙股 DNA 抗體 | Anti-dsDNA Ab | 血清 | 3ml | 2 | SST黃頭管 | 7天 | 30天 | |
| 12064 | 可抽出的核抗體 -SSA(Ro)/SSB(La) | Anti-ENA-SSA(Ro)/SSB(La) | 血清 | 3ml | 2 | SST黃頭管 | 7天 | 30天 | |
| 12173 | 可抽出的核抗體-SmD/RNP | Anti-ENA SmD/RNP | 血清 | 3ml | 2 | SST黃頭管 | 7天 | 30天 | |
| 12174 | 可抽出的核抗體測定-Scl-70s | Anti-ENA-Scl-70s | 血清 | 3ml | 2 | SST黃頭管 | 7天 | 30天 | |
| 12154 | 可抽出的核抗體-JO-1 | Anti-ENA-JO-1 | 血清 | 3ml | 2 | SST黃頭管 | 7天 | 30天 | |

臺北市立聯合醫院檢驗部

採檢手冊

TCH-QP-5.4-2-(5)

| | | | | | | | | | |
|----------|--------------------------|---|----|-----|---|---------|-----|------|--|
| 30020 | 抗心脂抗體-IgG | Anti-cardiolopin-IgG | 血清 | 3ml | 2 | SST 黃頭管 | 7 天 | 30 天 | |
| 30028 | 抗心脂抗體-IgM | Anti-cardiolopin-IgM | 血清 | 3ml | 2 | SST 黃頭管 | 7 天 | 30 天 | |
| 12201 | 抗環瓜氨酸肽抗體 | Anti-CCP (Anti-cyclic citrullinated peptide Ab) | 血清 | 3ml | 2 | SST 黃頭管 | 7 天 | 30 天 | |
| 12063 | 自體抗體篩檢 | Anti-ENA Screen(CTD) | 血清 | 3ml | 2 | SST 黃頭管 | 7 天 | 30 天 | |
| 12138 | 抗腎絲球基底膜抗體 | Anti-glomerular basement membrane Ab(Anti-GBM) | 血清 | 3ml | 2 | SST 黃頭管 | 7 天 | 30 天 | |
| 12171 | 抗嗜中性球胞質抗體 ANCA | ANCA(Anti-nutrophil cytoplasmic b)-MPO/PR3 | 血清 | 3ml | 2 | SST 黃頭管 | 7 天 | 30 天 | |
| 12156 | 抗核醣 P 蛋白抗體 | Anti-Ribosomal-P Ab | 血清 | 3ml | 2 | SST 黃頭管 | 7 天 | 30 天 | |
| 30027 | 抗 β 2糖蛋白 I 抗體-IgG | Anti- β 2-glycoprotein I-IgG | 血清 | 3ml | 2 | SST 黃頭管 | 7 天 | 30 天 | |
| 30029 | 抗 β 2糖蛋白 I 抗體-IgM | Anti- β 2-glycoprotein I-IgM | 血清 | 3ml | 2 | SST 黃頭管 | 7 天 | 30 天 | |
| 30022-10 | 常見吸入性過敏原 Panel A | Common Inhaled Allergens | 血清 | 3ml | 2 | SST 黃頭管 | 7 天 | 30 天 | |
| 30022-11 | 小兒食物性過敏原 Panel B | Common Food Allergens | 血清 | 3ml | 2 | SST 黃頭管 | 7 天 | 30 天 | |
| 30022-12 | 食物性過敏原 Panel C | Food Allergens | 血清 | 3ml | 2 | SST 黃頭管 | 7 天 | 30 天 | |
| 30022-13 | 吸入性過敏原 Panel D | Inhaled Allergens | 血清 | 3ml | 2 | SST 黃頭管 | 7 天 | 30 天 | |
| 30022-14 | 化學藥物過敏原 Panel E | Drug Allergens | 血清 | 3ml | 2 | SST 黃頭管 | 7 天 | 30 天 | |
| 30022-15 | 食物與吸入性過敏原 Panel F | Common Inhaled&Food Allergens | 血清 | 3ml | 2 | SST 黃頭管 | 7 天 | 30 天 | |
| 30051L1 | 20項特異性過敏原免疫檢驗-兒童(自費) | Specific IgE Test - 20 Allergens Profile | 血清 | 3ml | 2 | SST 黃頭管 | 7 天 | 30 天 | |
| 30051L1 | 20項特異性過敏原免疫檢驗-成人(自費) | Specific IgE Test - 20 Allergens Profile | 血清 | 3ml | 2 | SST 黃頭管 | 7 天 | 30 天 | |
| 30051L2 | 50項特異性過敏原免疫檢驗(自費) | Specific IgE Test - 50 Allergens Profile | 血清 | 3ml | 2 | SST 黃頭管 | 7 天 | 30 天 | |
| 30051L3 | 28項特異性過敏原免疫檢驗(自費) | Specific IgE Test - 28 Allergens Profile | 血清 | 3ml | 2 | SST 黃頭管 | 7 天 | 30 天 | |
| 30023 | 嗜伊紅血球陽離子蛋白檢驗 | ECP Test | 血清 | 3ml | 2 | SST 黃頭管 | 7 天 | 30 天 | |
| 30021 | Phadiatop(混合類過敏原特異性 IgE) | Allergen test Phadiatop Infant | 血清 | 3ml | 2 | SST 黃頭管 | 7 天 | 30 天 | |
| 08158T | 抗穆氏管賀爾蒙 | (AMH)Anti-Mullerian Hormone | 血清 | 3ml | 2 | SST 黃頭管 | 7 天 | 7 天 | |
| 12053 | 抗核抗體 | ANA | 血清 | 3ml | 2 | SST 黃頭管 | 9 天 | 10 天 | |
| 12022 | 發熱疾病的凝集試驗 | Widal test | 血清 | 3ml | 2 | SST 黃頭管 | 4 天 | 10 天 | |
| 12121 | 甲促素結合抗體 | TSH receptor Ab | 血清 | 3ml | 2 | SST 黃頭管 | 7 天 | 10 天 | |
| 09111 | 甲狀腺球蛋白 | Thyroglobulin | 血清 | 3ml | 2 | SST 黃頭管 | 7 天 | 10 天 | |
| 27080 | DHEA-S | DHEA-S | 血清 | 3ml | 2 | SST 黃頭管 | 7 天 | 10 天 | |

分子生物組採檢一覽表

仁愛院區聯合檢驗中心分生組 分機 710-5140 送檢時間：週間上午 8：00～下午 4：30，
親子鑑定須連絡排程

| 健保代碼 | 中文名稱 | 英文名稱 | 檢體類別 | 檢體量 | 檢體容器 | 檢驗時效 (日曆天) | 可追加 時效 | 注意事項 |
|------------------|---------------------|-------------------------------|--|---------------|-------------------|------------------|-----------|--|
| 自費 (08153T) | 親子鑑定 | Paternity Test | 為顧及病人隱私及親緣 DNA 鑑定技術規範，開立此項檢驗醫令單、採檢及核發報告皆由仁愛院區執行，歡迎各院區轉介。 | 視案件而定 | 視案件而定 | 視案件而定 | 視案件而定 | 1. 請先電話聯絡：分機 5140 2. 受檢者請直接到仁愛院區分生病毒室採檢 |
| 自費 (08154T) | 慢性骨髓增生疾病 JAK2 突變之篩檢 | JAK2 mutation detection | 血液 | 每支 2 ml | EDTA 紫頭管兩支 | 7 天 | 14 天 | |
| 自費 (08154T) | 基因定序(其他) | Sequence | PCR 等 | 15ul | PCR 專用微量離心管 | 視檢體數量而定 | 視檢體數量而定 | 請先電話聯絡：分機 5140 |
| 12086 | HLA-B27(組織抗原配合試驗) | HLA-B27 | 血液 | 2-3ml | EDTA 紫頭管 | 5 天 | 14 天 | 檢體採血後若無法 2 天內送檢，請冷藏 2-8℃。 |
| 12183A | 新型冠狀病毒 PCR | COVID-19 PCR | 痰液 鼻咽拭子 | 1-3ml 拭子檢體 | 無菌盒 COVI 無菌採檢組 | 24 小時* (備註 1) | 無 | 2-8℃ 保存/運送。 |
| 急件自費 (00210T) | 新型冠狀病毒 PCR | COVID-19 PCR | 鼻咽拭子 | 拭子檢體 | COVI 無菌採檢組 | 24 小時* (備註 1) | 無 | 2-8℃ 保存/運送。 |
| 常規自費 (00213T) | 新型冠狀病毒 PCR | COVID-19 PCR | 鼻咽拭子 | 拭子檢體 | COVI 無菌採檢組 | 48 小時* (備註 1) | 無 | 2-8℃ 保存/運送。 |

細菌檢驗組採檢一覽表

仁愛院區聯合檢驗中心細菌組 分機 710-5106

送檢時間：週一到週五 上午 8：00～下午 4：50；週六上午 8:00～12:00

週日 上午 8：00～上午 10：30

| 健保代碼 | 中文名稱 | 英文名稱 | 檢體類別 | 檢體量 | 容器編號 | 檢體容器 | 檢驗時效 (日曆天) | 可追加時效/ 天 | 注意事項 |
|-------|--------------|---|----------|-------------------------------------|-----------------|------------------|-----------------|-------------|---|
| 13016 | 血瓶培養(血液) | Blood culture | 血液 | 成人, 大小孩: 6-20ml 嬰兒:1-3ml (每瓶) | 18/20 19(小兒) | 血液培養瓶 | 7 天 | | 每位病人至少抽兩套, 懷疑急性菌血症可在 10 分鐘內由不同部位抽兩套 |
| 13016 | 血瓶培養(體液) | Body fluids culture in blood culture bottles | 體液 | 3-10ml(每瓶) | 18/20 19(小兒) | 血液培養瓶 | 7 天 | | 主要指 pericardial fl.、ascites、pleural fl.、synovial fl. 及 dialysis effluent。 |
| 13016 | 血瓶培養(膿瘍) | Abscess culture in blood culture bottles | 膿瘍 | 3-10ml(每瓶) | 18/20 19(小兒) | 血液培養瓶 | 7 天 | | 必須為非開放性部位, 並建議直接送抽取液培養(無須置於血瓶中)。 |
| 13016 | 血瓶培養(骨髓) | Bone marrow culture in blood culture bottles | 骨髓 | 1-3ml(每瓶) | 18/20 19(小兒) | 血液培養瓶 | 7 天 | 菌株保留 6 天 | |
| 13016 | 血瓶培養(黴菌) | Culture for fungi in blood culture bottles | 血液、骨髓 | 3-10 ml | 17/18 19(小兒) | 黴菌培養瓶/血液培養瓶(含樹脂) | 14 天 | | 立即運送或存於室溫, 勿超過 24 小時。 |
| 13016 | 血瓶培養(其他) | Other specimen culture in blood culture bottles | 註明檢體別 | 最多 10 ml | 18/20 19(小兒) | 血液培養瓶 | 7 天 | | |
| 13007 | 腦脊髓液嗜氧菌培養 | CSF aerobic culture | 腦脊髓液 | >1ml | 21/27 | 無菌試管/無菌杯 | 不長菌:7 天; 長菌:5 天 | | 立即運送或存於 35°C 溫箱, 勿超過 24 小時 |
| 13008 | 腦脊髓液厭氧菌培養 | CSF anaerobic culture | 腦脊髓液 | >1ml | 21/27 | 無菌試管/無菌杯 | 10 天 | | |
| 13007 | 尿液細菌培養(中段尿) | Urine culture-midstream | 中段尿 | ≥1ml | 27 | 無菌盒 | 不長菌:3 天; 長菌:5 天 | | |
| 13007 | 尿液細菌培養(導尿) | Urine culture-from foley | 導尿 | 3-5ml | 27 | 無菌盒 | 不長菌:3 天; 長菌:5 天 | | |
| 13007 | 尿液細菌培養(穿刺尿) | Urine culture-from suprapubic aspiration | 穿刺尿 | 5-10ml | 27 | 無菌盒 | 不長菌:3 天; 長菌:5 天 | | 立即運送或存於 4°C, 勿超過 24 小時 |
| 13007 | 痰液細菌培養 | Sputum culture | 痰液 | >1ml | 26/27 | 無菌盒 | 不長菌:3 天; 長菌:5 天 | | |
| 13007 | 支氣管肺泡沖洗液細菌培養 | Bronchoalveolar lavage culture | 支氣管肺泡沖洗液 | >1ml | 26/27 | 無菌盒 | 不長菌:3 天; 長菌:5 天 | | |
| 13007 | 喉頭拭子細菌培養 | Throat swab culture | 喉頭拭子 | 適量 | 14 | 藍頭 Swab | 不長菌:3 天; 長菌:5 天 | | |

臺北市立聯合醫院檢驗部

採檢手冊

TCH-QP-5.4-2-(5)

| | | | | | | | | |
|-------|--------------------------|--|----------|---------------|---------------------|----------------------------|---------------|---------------------------------------|
| 13007 | 糞便細菌培養 | Stool culture | 糞便 | 約>2g | 12 | 綠頭 Swab(含 Cary Blair 之輸送管) | 正常菌:3天;致病菌:5天 | |
| 13007 | 糞便沙門&志賀菌培養 (Sal. & Shig) | Stool culture for Salmonella & Shigella | 糞便 | 約>2g | 12 | 綠頭 Swab(含 Cary Blair 之輸送管) | 不長菌:3天;長菌:5天 | |
| 13007 | 糞便艱難梭菌培養(C. difficile) | Stool culture for Clostridium difficile | 糞便 | 約2g或>5ml | 11 | 綠頭 Swab(含 Cary Blair 之輸送管) | 10天 | 立即運送或存於4℃,勿超過24小時 |
| 13007 | 糞便彎曲桿菌培養 (Campylobacter) | Stool culture for Campylobacter spp. | 糞便 | 約2g或5ml | 12 | 綠頭 Swab(含 Cary Blair 之輸送管) | 3天 | |
| 13007 | 糞便腸炎弧菌培養 (Vibrio) | Stool culture for Vibrio spp. | 糞便 | 約2g或5ml | 12 | 綠頭 Swab(含 Cary Blair 之輸送管) | 不長菌:3天;長菌:5天 | |
| 13007 | 腹水嗜氧菌培養 | Ascites aerobic culture | 腹水 | 5-10ml | 21/27 | 無菌試管/無菌杯 | 不長菌:7天;長菌:5天 | 菌株保留6天 |
| 13008 | 腹水厭氧菌培養 | Ascites anaerobic culture | 腹水 | 5-10ml | 21/27 | 無菌試管/無菌杯 | 10天 | |
| 13007 | 胸水嗜氧菌培養 | Pleural fluid aerobic culture | 胸水 | 5-10ml | 21/27 | 無菌試管/無菌杯 | 不長菌:7天;長菌:5天 | |
| 13008 | 胸水厭氧菌培養 | Pleural fluid anaerobic culture | 胸水 | 5-10ml | 21/27 | 無菌試管/無菌杯 | 10天 | |
| 13007 | 關節液嗜氧菌培養 | Joint fluid aerobic culture | 關節液 | 5-10ml | 21/27 | 無菌試管/無菌杯 | 不長菌:7天;長菌:5天 | |
| 13008 | 關節液厭氧菌培養 | Joint fluid anaerobic culture | 關節液 | 5-10ml | 21/27 | 無菌試管/無菌杯 | 10天 | |
| 13007 | 管端培養(Tip)-部位 | Tip culture-sites | 註明管端來源 | 5公分長 | 27 | 無菌盒 | 不長菌:3天;長菌:5天 | 立即運送或存於4℃,勿超過2小時。Foley catheter 不可培養。 |
| 13007 | 膿/傷口/膿瘍 嗜氧菌培養 | Pus/wound/abscess-site aerobic culture | 膿-註明部位 | 適量 | 11 | 黑頭 Swab | 不長菌:3天;長菌:5天 | 立即運送或存於4℃,勿超過24小時 |
| 13008 | 膿/傷口/膿瘍 厭氧菌培養 | Pus/wound/abscess-site anaerobic culture | 膿-註明部位 | 適量 | 11 | 黑頭 Swab | 10天 | |
| 13007 | 生殖泌尿道分泌物細菌培養 | Genitourinary tract discharge culture | 泌尿道分泌物 | 適量 | 11/27 | 黑頭 Swab/無菌杯 | 不長菌:3天;長菌:5天 | 立即運送或存於室溫,勿冷藏。 |
| 13007 | 生殖泌尿道分泌物淋菌培養 | Genitourinary tract discharge culture for N. gonorrhoeae | 生殖泌尿道分泌物 | 適量 | 11 | 黑頭 Swab | 5天 | 立即運送,或直接接種在 Transgrow,勿冷藏。 |
| 13007 | 眼部分泌物細菌培養 | Eye discharge culture | 眼部分泌物 | 適量 | 11/27 | 黑頭 Swab/無菌杯 | 3-7天 | 立即運送或存於室溫,勿超過24小時 |
| 13007 | 耳部分泌物細菌培養 | Ear discharge culture | 耳部分泌物 | 適量 | 11 | 黑頭 Swab | 3-7天 | 立即運送或存於4℃,勿超過24小時 |
| 13007 | 鼻腔分泌物細菌培養 | Nasal discharge culture | 鼻腔分泌物 | 適量 | 14 | Throat swab | 不長菌:3天;長菌:5天 | |
| 13007 | 嗜氧菌培養-其他 | Aerobic culture-0thers | 註明檢體別 | 適量 | 11/27 | 黑頭 Swab/無菌杯 | 不長菌:3天;長菌:5天 | 菌株保留6天 |
| 13008 | 厭氧菌培養-其他 | Anaerobic culture-0thers | 註明檢體別 | 適量 | 11/27 | 黑頭 Swab/無菌杯 | 10天 | |
| 13007 | 真菌培養-其他 | Culture for Fungi-0thers | 註明檢體別 | 適量 (CSF3ml以上) | 27 21 11 4 | 無菌杯(無菌試管、Swab或heparin 綠頭管) | 28天 | |
| | | | | | | | | 立即運送或存於4℃,勿超過24小時。血液、骨髓或可能凝固之檢體 |

| | | | | | | | | | |
|-------|---------------|------------------------------------|-------|-----|----------|-------------------|--------------|---|---|
| | | | | | | | | | 可加適量(1ml 檢體約 0.2mg heparin)之 heparin 於無菌容器內。 |
| 13007 | 母乳滅菌前嗜氧培養 | Breast milk aerobic culture(滅菌前) | 滅菌前母乳 | 5ml | 27 | 無菌盒 | 不長菌:3天;長菌:5天 | | 立即運送或存於4℃ |
| 13007 | 母乳滅菌後嗜氧培養 | Breast milk aerobic culture(滅菌前) | 滅菌後母乳 | 5ml | 27 | 無菌盒 | 不長菌:3天;長菌:5天 | | |
| 13008 | 母乳滅菌後厭氧培養 | Breast milk anaerobic culture(滅菌後) | 滅菌後母乳 | 5ml | 27 | 無菌盒 | 不長菌:3天;長菌:5天 | | |
| 13006 | 革蘭氏染色 | Grams stain | 痰/體液 | 適量 | 21/27/28 | 無菌試管/無菌盒/50ml 尖底管 | 1-2 工作天 | 無 | 視檢體類別而定 |
| 12191 | 退伍軍人菌尿液抗原快速檢驗 | Legionella urinary Ag | 尿液 | 5ml | 9 | 尿管(涵蓋) | 1天 | 無 | |

林森中醫昆明院區檢驗科分機 720-1438

送檢時間：週間上午 8：00～下午 4：30

| 健保代碼 | 中文名稱 | 英文名稱 | 檢體類別 | 檢體量 | 容器編號 | 檢體容器 | 檢驗時效 | 可追加時效/天 | 注意事項 |
|--------------------------|------------------------|----------------------------------|------|---------------------------------|------|---|------------|---------|--|
| 12001 | 梅毒 RPR/RPR(L) 抗體 | RPR/RPR(L) | 血清 | 5 mL | 2 | SST 黃頭真空管 | 2 工作天發初步報告 | 7 天 | 抽足檢體量，離心後 2-8°C 保存，儘速送檢 |
| 12001 | 梅毒 VDRL 抗體 | VDRL | CSF | 1mL | 21 | 康氏管 | 2 工作天 | 7 天 | |
| 12018 | 梅毒 TPLA 抗體 | TPLA | 血清 | 5 mL | 2 | SST 黃頭真空管 | 2 工作天發初步報告 | 7 天 | |
| 14049 | HIV I/II 抗原抗體 | HIV I/II Ag-Ab | 血清 | 5 mL | 2 | SST 黃頭真空管 | 2 工作天發初步報告 | 7 天 | |
| 14075 | HIV-1/2 抗體確認 檢驗免疫層析 | HIV 1/2 Confirmatory Assay | 血清 | 3 mL | 2 | SST 黃頭促凝管 | 2 工作天 | 7 天 | |
| | | | | 3 mL | 1 | EDTA 紫頭管(1 黃 1 紫) | | | |
| 12073+ 12071 | 淋巴球抗原檢查 | CD3/CD4/CD8/CD19/CD56/CD16 | 全血 | 3 mL | 1 | EDTA 紫頭管 | 1 工作天 | 無 | 20 小時內室溫於週一~五 15:00 前送達 |
| 14074 | HIV-I 病毒負荷量 | HIV Viral Load | 血漿 | 全血 2 管 3 mL/管或血漿 2 管至少 1.2 mL/管 | 1 | EDTA 紫頭管/離心分裝至可冷凍螺旋蓋管 | 14 工作天 | 無 | 抽血當天，室溫狀態於週一~五 16:00 前送達。抽血隔天：2-8°C 保存/運送。抽血超過 5 天：-70°C 保存/乾冰運送。 |
| 12182-33/58/ 24/20/64 | 披衣菌/淋菌/女性陰道滴蟲 PCR | CT/NG/TV PCR | 尿液 | 前段尿 | 16 | BD MAX UVE 緩衝液管 | 3 工作天 | 無 | 尿液：憋尿 2 小時，取前段尿送檢(1CC.加入緩衝液管)，2-8°C 保存 子宮頸：使用使用 BD MAX UVE 採檢刷組，2-30°C 送檢。週一~五 16:00 前送達。 |
| | | | 子宮頸 | 拭子檢體 | 16 | BD MAX UVE specimen collection kit/緩衝液管 | | | |

臺北市立聯合醫院檢驗部

採檢手冊

TCH-QP-5.4-2-(5)

| 健保代碼 | 中文名稱 | 英文名稱 | 檢體類別 | 檢體量 | 容器編號 | 檢體容器 | 檢驗時效 | 可追加時效/天 | 注意事項 |
|-------------------------|---------------------|------------------------------------|------------|----------------------------------|----------|---|--------|---------|---|
| 12182-61/62/63 | 女性陰道黴菌、細菌、滴蟲病原體 PCR | Vaginalis Microbial Identification | 陰道分泌物 | 拭子檢體 | 16 | BD MAX UVE specimen collection kit/緩衝液管 | 3 工作天 | 無 | 子宮頸:使用使用 BD MAX UVE 採檢刷組，2-30°C 送檢。週一~五 16:00 前送達。 |
| 08154T | HIV-I 基因分型 | HIV-I Genotyping | 血漿 | 全血 2 管 3 mL/管 或血漿 2 管至少 1.2 mL/管 | 1 | EDTA 紫頭管/離心分裝至可冷凍螺旋蓋管 | 30 工作天 | 無 | 抽血當天，室溫狀態於週一~五 16:00 前送達。抽血隔天：2-8°C 保存/運送。抽血超過 5 天：-70°C 保存/乾冰運送。 |
| 12183A01/02 00210T01 | 新型冠狀病毒病毒 PCR | COVID-19 PCR | 痰液 鼻咽拭子 | 1-3ml 拭子檢體 | 27 34 | 無菌盒 COVI 無菌採檢組 | 48 小時 | 無 | 2-8°C 保存/運送。 |
| 13025 | 抗酸性濃縮抹片染色 | Acid-Fast Stain | 註明檢體別 | 適量 | 28 | 50ml 藍蓋尖底管 | 1 天 | 無 | |
| 13026 | 抗酸性培養 | Acid-Fast culture | 註明檢體別 | 適量 | 28 | 50ml 藍蓋尖底管 | 60 天 | 無 | (CSF3ml 以上) |
| 12082 | 結核桿菌群分生篩檢 | MTBC PCR | 註明檢體別 | 1-3ml | 28 | 50ml 藍蓋尖底管 | 2-4 天 | 無 | |
| 13055 | 丙型肝炎病毒釋放試驗 | IGRA | 全血 | 1 mL/管 | 7 | IGRA 專用試管 | 7 天 | 無 | 抽血當天，室溫狀態於週一~五 16:00 前送達。 抽血隔天：37°C 培養 16 至 24 小時後室溫運送。 |

臺北市立聯合醫院檢驗部

採檢手冊

TCH-QP-5.4-2-(5)

血庫組採檢一覽表 各院區急診檢驗室 送檢時間：24 小時

| 健保代碼 | 中文名稱 | 英文名稱 | 檢體類別 | 檢體量 | 容器編號 | 檢體容器 | 報告時間 (日曆天) | 可追加 時效/ 小時 | 注意事項 |
|-------|----------|------------------------------------|------|------|------|----------|---------------|------------------|----------------------|
| 11005 | 抗體鑑定 | Antibody identification | 全血 | 8ml | 1 | EDTA 紫頭管 | 3 天 | 3 天 | 須貼血庫專用標籤 |
| 11002 | 交叉試驗 | Cross matching | 全血 | 4ml | 1 | EDTA 紫頭管 | 1 小時 | 3 天 | 須貼血庫專用標籤 |
| 11011 | 輸血反應調查 | Transfusion reaction investigation | 血清 | 3ml | 2 | SST 黃頭管 | 3 天 | 無 | 送回有輸血反應之血袋及觀察尿液是否有溶血 |
| | | | 全血 | 6ml | 1 | EDTA 紫頭管 | | | |
| 11004 | 抗體篩檢 | Antibody screening | 全血 | 4ml | 1 | EDTA 紫頭管 | 1 小時 | 3 天 | 須貼血庫專用標籤 |
| 11006 | 抗體沖出與鑑定 | Elution test | 全血 | 10ml | 1 | EDTA 紫頭管 | 7 天 | 無 | |
| 12099 | 直接抗球蛋白試驗 | Direct Coomb' s test (DAT) | 全血 | 2ml | 1 | EDTA 紫頭管 | 3 天 | 3 天 | |
| 11010 | 特殊血型研究 | Special blood group study | 全血 | 8ml | 1 | EDTA 紫頭管 | 7 天 | 無 | |
| | | | 唾液 | 10ml | 27 | 無菌盒 | | | |

和平婦幼院區 細胞遺傳檢驗項目

(婦幼)細胞遺傳室電話： 713-2401

送檢時間：上午 8：00～下午 4：30

***隔天送檢一律冰存於 4℃**

| 健保代碼 | 項目 | 檢體別 | 檢體量 | 容器 編號 | 檢體容器 | 報告時間 (日曆天) | 可追加時 效/小時 | 注意事項 | |
|----------------|--------------|-----------|---------|----------|---|---------------|--------------|-------------------------|-----------------------------|
| | | | | | | | | 保存期限/溫度 | 退件標準 |
| 自費 (25031T) | 羊水染色 體檢查 | 羊水 | 15-20ml | | 無菌管/針筒 需 貼識別標籤 | 3 星期以內 | 無 | 儘速送檢 48 小時 內/4℃-8℃ | 屬其它體液 |
| 自費 (25035T) | 絨毛膜染 色體檢查 | 絨毛膜 組織 | 適量 | | 無菌管/小皿(內 含 Heparin medium) 需貼識 別標籤 | 3 星期以內 | 無 | 儘速送檢 48 小時 內/4℃-8℃ | 非絨毛組織 |
| 自費 (25035T) | 組織染色 體檢查 | 組織 | 適量 | | 無菌管/小皿 (含 培養液或浸濕紗 布塊) | 3 星期以內 | 無 | 儘速送檢 48 小時 內/4℃-8℃ | 大件/大量組織或 混在大量血水中 |
| 自費 (25037T) | 血液染色 體檢查 | 血液 | 8ml | 3 | Sodium Heparin 綠頭管 | 3 星期以內 | 無 | 儘速送檢 48-72 小時內/4℃-8℃ | 血液已凝固,採檢 超過 3 天已溶血 檢體 |
| 自費 (12161T) | 初期唐氏 症篩檢 | 血清 | 3ml 以上 | 2 | SST 黃頭管 | 當日完成 | 無 | 儘速送檢 24 小時 內/4℃-8℃ | 嚴重溶血 |
| 自費 (12160T) | 中期唐氏 症篩檢 | 血清 | 3ml 以上 | 2 | SST 黃頭管 | 一星期內 | 無 | 儘速送檢 24 小時 內/4℃-8℃ | 嚴重溶血 |
| 自費 (30547T) | 子癲前症 篩檢 | 血清 | 3ml 以上 | 2 | SST 黃頭管 | 當日完成 | 無 | 儘速送檢 24 小時 內/4℃-8℃ | 嚴重溶血 |

臺北市立聯合醫院檢驗部

採檢手冊

TCH-QP-5.4-2-(5)

| 健保代碼 | 項目 | 英文名稱 | 檢體別 | 檢體量 | 容器編號 | 檢體容器 | 報告時間 (日曆天) |
|---------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-----|--------|-------|-----------------|---------------|
| 25032T02/01 (自費) | 脊髓性肌肉萎縮症之基因 | MLPA-SMA | 血液 | 2-3 ml | 1 | EDTA 紫頭管 | 7 天 |
| | | | 羊水 | 5 ml | 27/28 | 無菌杯(無菌尖底離心管或針筒) | |
| 25032T04/03 (自費) | Trisomy13, 18, 21, XY 快速基因篩檢 | MLPA-TRISOMY13, 18, 21, XY | 血液 | 2-3 ml | 1 | EDTA 紫頭管 | 7 天 |
| | | | 羊水 | 5 ml | 27/28 | 無菌杯(無菌尖底離心管或針筒) | |
| 25032T06(自費) | 小胖威利症基因篩檢 | MLPA-Prader-Willi syndrome | 血液 | 2-3 ml | 1 | EDTA 紫頭管 | 7 天 |
| 25032T05(自費) | 威廉氏症基因篩檢 | MLPA-Willi syndrome | 血液 | 2-3 ml | 1 | EDTA 紫頭管 | 7 天 |
| 25032T10(自費) | 雷特氏症 MECP2 基因鑑定 | MECP2 GENE ANALYSIS | 血液 | 2-3 ml | 1 | EDTA 紫頭管 | 1 月 |
| 25032T07(自費) | 性徵基因鑑定 (AR, SOX9, WT1, SRD5A2) | (AR, SOX9, WT1, SRD5A2) | 血液 | 2-3 ml | 1 | EDTA 紫頭管 | 1 月 |
| 250321T11(自費) | 白化症 OCA1 基因鑑定 | OCA1 GENE ANALYSIS | 血液 | 2-3 ml | 1 | EDTA 紫頭管 | 1 月 |
| 25032T09(自費) | 無汗症 ED1 基因鑑定 | HED | 血液 | 2-3 ml | 1 | EDTA 紫頭管 | 1 月 |
| 25032T12(自費) | 軟骨症 Hotspot 基因鑑定 | Achondroplasia | 血液 | 2-3 ml | 1 | EDTA 紫頭管 | 2 週 |
| 25032T08(自費) | 性徵 SRY 基因鑑定 | SRY gene analysis | 血液 | 2-3 ml | 1 | EDTA 紫頭管 | 2 週 |
| 08154T02(自費) | X 染色體脆折症男性基因篩檢 | Fragile X syndrome FRAXA PCR screen | 血液 | 2-3 ml | 1 | EDTA 紫頭管 | 7 天 |

婦幼分生室 病毒檢驗項目

婦幼分生室電話： 713-2403/713-2404

送檢時間：上午 8：00～下午 4：30

*隔天送檢一律冰存於 4℃

| 健保代碼 | 項目 | 英文名稱 | 檢體別 | 檢體量 | 容器 編號 | 檢體容器 | 報告時間 (日曆天) |
|--------|--------------------------|---------------------------------|------|-------------------|----------|-------------|---------------|
| 12182C | 巨大細胞病毒 篩檢 (PCR) | CMV, PCR | 血液 | 2-3 ml | 1 | EDTA 紫頭管 | 7 天 |
| | | | 尿液 | 8-12 ml | 28/27 | 無菌尖底離心管或無菌盒 | |
| | | | 其他 | 以無菌檢體盒裝置檢體 | | | |
| | | | 眼房水 | 針筒抽取後請回套後黏牢 | | | |
| | | | 眼角膜 | 以無菌檢體盒裝置檢體並標示檢體位置 | | | |
| 12182C | 子宮頸人類乳 突病毒篩檢 (PCR) | HPV, PCR | swab | 適量 | | 患部拭子 | 7 天 |
| | | | 血液 | 2-3 ml | 1 | EDTA 紫頭管 | |
| 12182 | 單純庖疹病毒 篩檢 (PCR) | HSV-1/HSV-2, PCR | 血液 | 2-3 ml | 1 | EDTA 紫頭管 | 7 天 |
| | | | 眼房水 | 針筒抽取後請回套後黏牢 | | | |
| | | | 眼角膜 | 以無菌檢體盒裝置檢體並標示檢體位置 | | | |
| | | | CSF | 3-5 ml | 28/27 | 無菌尖底離心管或無菌盒 | |
| | | | swab | 適量 | | 患部拭子 | |
| 12182C | 愛伯斯坦-巴 爾病毒篩檢 (PCR) | EBV, PCR | 血液 | 2-3 ml | 1 | EDTA 紫頭管 | 7 天 |
| | | | CSF | 3-5 ml | 28/27 | 無菌尖底離心管或無菌盒 | |
| | | | swab | 適量 | | 患部拭子 | |
| 12183C | 腸病毒篩檢 (PCR) | Enterovirus PCR | 血液 | 2-3 ml | 1 | EDTA 紫頭管 | 7 天 |
| | | | CSF | 3-5 ml | 28/27 | 無菌尖底離心管或無菌盒 | |
| | | | swab | 適量 | | 患部拭子 | |
| 12183C | 砂眼披衣菌篩 檢 (PCR) | (Chlamydia trachomatis ;PCR) | 血液 | 2-3 ml | 1 | EDTA 紫頭管 | 7 天 |
| | | | swab | 適量 | | 患部拭子 | |